


必要な時に、必要な場所で お体の移乗が驚くほど楽になる省力化ツール！

移乗ボードを導入するメリットとは??

- ・ 病院などで看護師さんの手伝いがなくてもベッドからのお体の移乗がスムーズにでき、ワンオペ搬送しやすくなる。
- ・ 薄くて場所を取らないので、寝台車に1枚ずつ装備しても邪魔にならない。
- ・ 軽くて、使い方も簡単なので現場に導入しやすい。
- ・ 負担のかかるお体の移乗作業で腰や肩の怪我の防止になるので、現場担当者の安全管理に役立つ

エアリースライド スタンダード

IAS-AS-ST

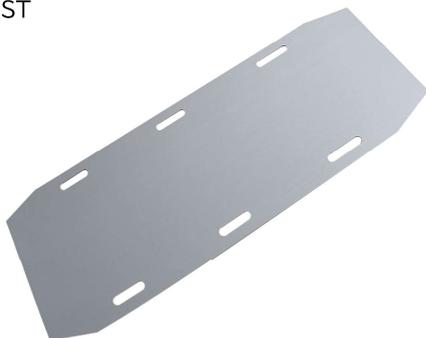

仕様

サイズ 幅 465mm 奥行き 1200mm 厚さ 5mm
材質 ポリプロピレン
重量 1.2kg

軽量で汎用性の高いサイズの移乗ボードです。
葬儀場、病院、ご自宅などでのお体の移乗に最適です。
スムーズな操作性で葬儀担当者の負担を軽減します

エアリースライド ポータブル

IAS-AS-PO



仕様

サイズ 幅 465mm 奥行き 900mm 厚さ 5mm
材質 ポリプロピレン
重量 0.9kg

コンパクトで軽量、持ち運びやすさを追求した移乗ボードです。
病院や施設内での移乗など搬送の相棒として活躍します。
取り扱いがしやすいサイズ感で、担当者の負担を軽減します。

エアリースライド グランド

IAS-AS-GR




仕様

サイズ 幅 500mm 奥行き 1800mm 厚さ 5mm
材質 ポリプロピレン
重量 1.8kg

全身サイズの移乗ボードです。葬儀場、安置施設などでのお体の移乗に安定したパフォーマンスを発揮します。
スムーズな操作性と耐久性を兼ね備え、葬儀担当者の負担を軽減します

※ 商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

エアリースライドのサイズ比較

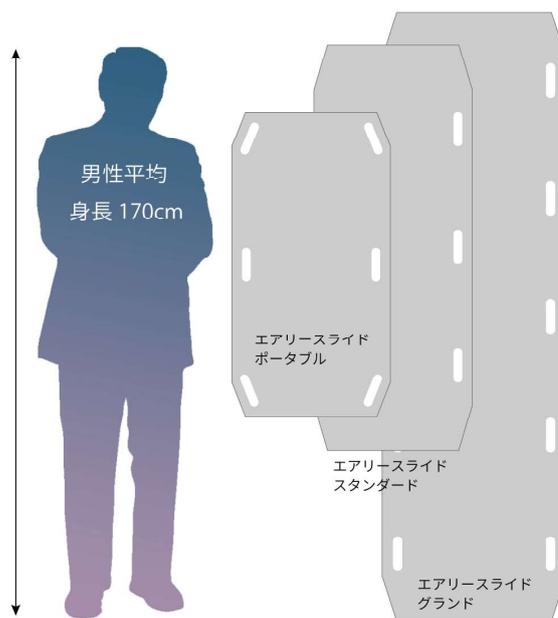

エアリースライドのご使用方法



ご使用方法は
動画でも
ご確認いただけます。



病院

病院での基本移乗:ベッドからストレッチャーへ



① お身体を自分側に少し傾け、エアリースライドを1/3程差し込みます。



② 腰と首の後ろ辺りをつかみ、滑らせるようにして引寄せます。
※持ち上げる必要はありません



③ 位置を微調整して完了です。
※搬送中は背中に挟んだままで大丈夫です。

安置施設

搬送後そのまま移乗:ストレッチャーから安置ボード(トレイ)へ



① すでにエアリースライドが体下にある場合、そのまま引き寄せることができます。



② 腰と首の後ろ辺りをつかみ、自分側に滑らせるようにして引き寄せます。



③ 体重がある方や、動かしにくい場合は、上半身と下半身を分けて引き寄せるとスムーズ・丁寧に移乗できます。

安置施設

背中にエアリースライドが無い状態からの移乗



① お身体を自分側にやさしく傾け、エアリースライドグランドを背中の下に挿入します。
※グランドは大きめサイズで、全身を支えやすいのが特長です。



② 腰と首の後ろ辺りをつかみ、滑らせるようにして引き寄せます。



③ お身体の位置を整え、エアリースライドを抜き取り、移乗完了です。



INPEACE公式
X



INPEACE公式
FACEBOOK



@INPEACE_2024
Instagram



公式WEBサイト

 INPEACE

Web:<https://inpeace.jp>