

エアリースライドのご使用方法



ご使用方法は
動画でも
ご確認くださいませ。



病院

病院での基本移乗: ベッドからストレッチャーへ



① お身体を自分側に少し傾け、エアリースライドを1/3程差し込みます。




② 腰と首の後ろ辺りをつかみ、滑らせるようにして引き寄せます。
※持ち上げる必要はありません




③ 位置を微調整して完了です。
※搬送中は背中に挟んだままで大丈夫です。

安置施設


搬送後そのまま移乗: ストレッチャーから安置ボード(トレイ)へ

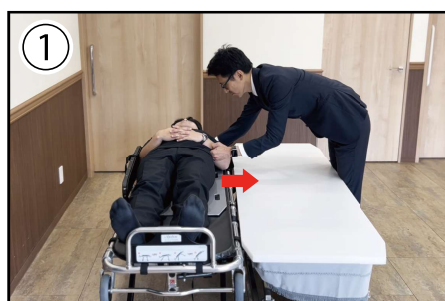

① すでにエアリースライドが体下にある場合、そのまま引き寄せることができます。

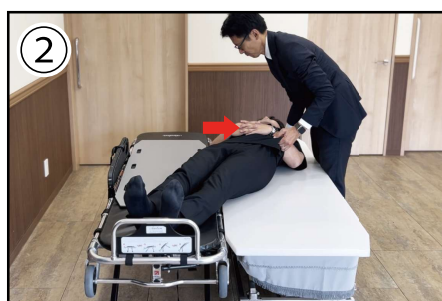

② 腰と首の後ろ辺りをつかみ、自分側に滑らせるようにして引き寄せます。

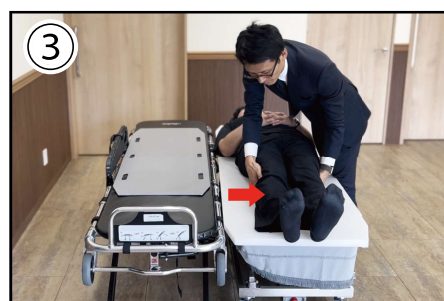

③ 体重がある方や、動かしにくい場合は、上半身と下半身を分けて引き寄せるとスムーズ・丁寧に移乗できます。

安置施設

背中にエアリースライドが無い状態からの移乗



① お身体を自分側にやさしく傾け、エアリースライドグランドを背中の下に挿入します。
※グランドは大きめサイズで、全身を支えやすいのが特長です。



② 腰と首の後ろ辺りをつかみ、滑らせるようにして引き寄せます。



③ お身体の位置を整え、エアリースライドを抜き取り、移乗完了です。



INPEACE公式
X



INPEACE公式
FACEBOOK



Instagram
@INPEACE_2024



公式WEBサイト

INPEACE

Web: <https://inpeace.jp>